

GUIDA RAPIDA

Prima dell'utilizzo, equilibrare tutti i componenti del test a temperature ambiente

1. STEP 1: Raccolta del campione


ATTENZIONE! la raccolta e l'applicazione del campione deve essere rapida per evitare la coagulazione del campione nella micropipetta.

- Girare il tappo della lancetta fino a che non si separa dal dispositivo. Ciò attiva la lancetta. Non tirare il tappo, girarlo soltanto.
- Premere l'estremità aperta della lancetta sulla punta del dito del paziente e premere il pulsante di rilascio.
- Eliminare la prima goccia di sangue (con una garza sterile o cotone).
- Raccogliere il campione di sangue:
 - Tenere la micropipetta per la raccolta del sangue in posizione orizzontale, con il foro di aerazione libero
 - Toccare il campione di sangue con la punta della provetta. Non toccare o grattare la pelle
 - Riempire la micropipetta fino alla linea di riempimento, evitando bolle d'aria



2. STEP 2: procedura del test

- Dispensare lentamente il campione di sangue (20 ul) nella cassetta del test
- Attendere 30-60 secondi fino a quando il sangue non è stato assorbito.
- Aggiungere due gocce di tampone di diluizione nella stessa finestra. Se il contagocce non viene utilizzato, aggiungere 100 ul di tampone di diluizione.

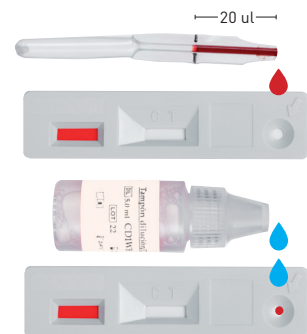

3. STEP 3: lettura dei risultati

- Incubare per 10 minuti
- Interpretare i risultati (C= linea di controllo; T= linea test)
- Non leggere i risultati dopo 10 minuti



Negative



Positive

