



Prodotto da:

**BIOHIT HealthCare**  
Innovating for Health

# TEST RAPIDO PER L'INTOLLERANZA AL LATTOSIO

## CONSERVAZIONE

Conservare il kit in frigorifero fra + 2°C e + 8°C.

## PRELIMINARI


Prelevare un campione biotipico dalla mucosa della parte superiore del piccolo intestino (duodeno). Rimuovere il sangue eventualmente presente adagiando brevemente il campione su una garza sterile.

La biopsia deve avere diametro compreso fra 1,5 e 2 mm.



## PROCEDURA DEL TEST

- 1** Riporre il campione biotipico nel pozzetto.  
Aggiungere nel pozzetto 2 gocce (80 µl) di substrato (Flacone 1).  
Chiudere l'etichetta ed agitare orizzontalmente per 5-6 volte.  
Incubare per 15 minuti a temperatura ambiente (20-25°C).
- 2** Aggiungere 1 goccia (10 µl) di cromogeno (Flacone 2),  
aggiungere immediatamente 2 gocce (80 µl) di stop solution (Flacone 3).  
Chiudere l'etichetta ed agitare orizzontalmente per 5-6 volte.  
Incubare per 5 minuti a temperatura ambiente (20-25°C).
- 3** I risultati sono interpretati in base alla colorazione (vedere tabella colorimetrica).

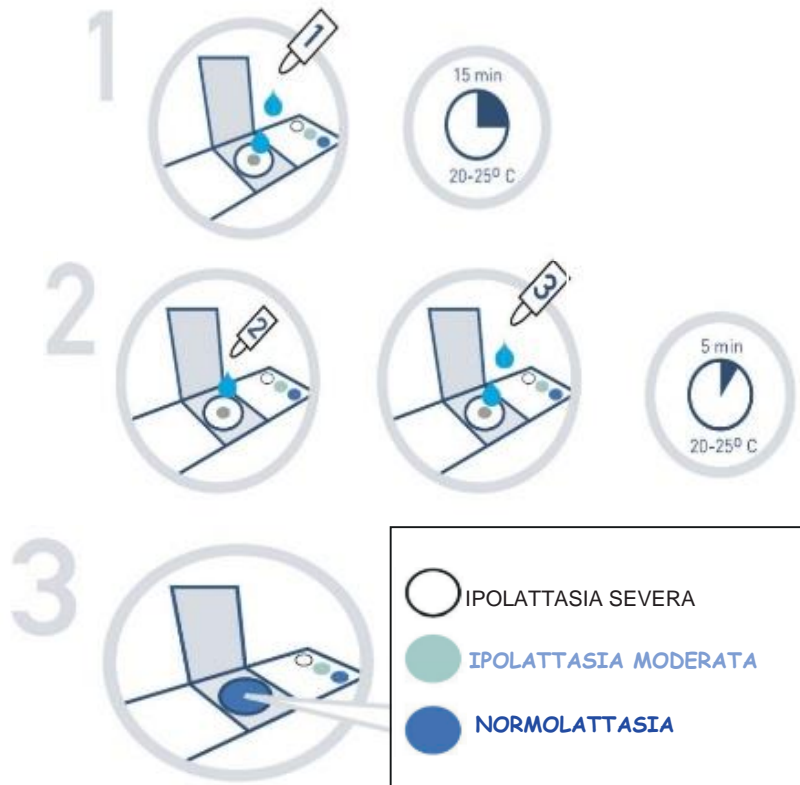

**BIOHIT HealthCare**  
Innovating for Health  
www.biohithealthcare.com

BIOHIT HealthCare Srl  
Via Boncompagni 3, 20139 Milano-Italia  
Tel: +39 02 38238113  
e-mail: info.italy@biohit.fi

BioHit Oy  
Laippatie 1, 00880 Helsinki, Finland  
Tel: +358 9 773 861,  
e-mail: info@biohit.fi