

Biohit Helicobacter pylori UFT300

test rapido con tubi conici

Guida rapida

Si raccomanda di testare il campione biotico immediatamente dopo la raccolta. Non lasciare asciugare il campione prima di eseguire il test. Se sul campione è visibile del sangue o della bile, tamponare brevemente la biopsia su una garza sterile.

1.
 - Scrivere l'ID del paziente sull'etichetta del tubo (fornito su fogli separati).
 - Inserire una o più biopsie dello stesso paziente nel tubo.



2.
 - Aggiungere una goccia della soluzione reagente nel tubo - solo la quantità minima necessaria per coprire la biopsia (fig 1). Tenere la bottiglia in posizione verticale mentre si aggiunge il liquido (fig. 2).
 - **Nota!** Fare attenzione a non aggiungere troppa soluzione reagente alla biopsia: basta aggiungere la quantità (minima) necessaria per coprire la biopsia.
 - Rimettere il tappo sul tubo.
 - Agitare il tubo orizzontalmente su una superficie piana per 5 secondi.



figura1

figura2



3.
 - Incubare per 5 minuti.
 - Rimuovere il tappo ed interpretare il risultato guardando nel tubo dall'alto.

Risultato negativo: Il colore della soluzione test rimane giallo.

Risultato positivo: il colore della soluzione test vira dal giallo al magenta.

Non leggere il colore dopo 5 minuti.



Negativo



Positivo

