

BIOHIT KELIAKIA

pikatesti



Tuotetiedot

- Näyte: sormenpääverinäyte
- Toimintaperiaate: immunologinen anti-tTG kudostransglutaminaasivasta-aineiden (IgA, IgG ja IgM) toteaminen
- Testipakkauksen sisältö: lansetit, mikropipetit näytteenkäsittelyyn, testikasetit, puskuriliuos, käyttöohjeet
- Säilytys: +2-8°C



Tilaustiedot:

Tuotenumero	Tuote
602070	20 testiä/laatikko



Biohit Oyj
Laippatie 1
00880 Helsinki
Puh. +358 9 773 861
Fax +358 9 773 86 200
info@biohit.fi

www.biohit.fi

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health



BIOHIT KELIAKIA

pikatesti

LUOTETTAVAAN ENSIVAIHEEN
DIAGNOSTIIKKAAN

490068F1 10/2014



10 min

KELIAKIA

pikatesti

Luotettava tulos sormenpää- verinäytteestä

Keliakiapikatestillä voidaan luotettavasti ja vaivattomasti määrittää keliakia vain pisarasta verta. Testi perustuu elimistön tuottamiin kudostransglutaminaasivasta-aineisiin; IgA, IgG ja IgM. Tästä johtuen testillä on erinomainen herkkyys, erityisesti niiden potilaiden kohdalla, jotka kärsivät IgA-puutoksesta.

- Tulos 10 minuutissa
- Tehdään sormenpääverinäytteestä
- Helppokäyttöinen immunokromatografisen testi
- Herkkyys yli 99 %, tarkkuus 98,9 %

Helppo vieritestaus

Verinäyte keliakiapikatestiä varten otetaan helposti sormenpästä. Näyte asetetaan testikasetille ja päälle tiputetaan puskuriliuosta. Testitulokset on luettavissa 10 minuutissa.


Helppo näytteenotto - nopeat tulokset

1. Ota sormenpääverinäyte.



2. Tyhjennä verinäyte (20 ul) näytteenkeräimestä näytekaivoon ja tiputa päälle kaksi tippaa puskuriliuosta.

1 a.

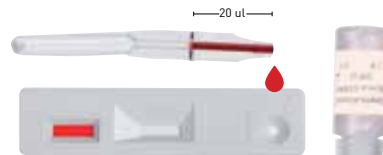

1 b.



3. Lue tulos 10 minuutin kuluttua.

Negatiivinen



Positiivinen



10 min

Tulos
10 minuutissa

