

BIOHIT KELIAKIA

pikatesti



Tuotetiedot

- Näyte: sormenpääverinäyte
- Toimintaperiaate: immunologinen anti-tTG kudostransglutaminaasivasta-aineiden (IgA, IgG ja IgM) toteaminen
- Testipakkauksen sisältö: lansetit, mikropipetit näytteenkäsittelyyn, testikasetit, puskuriliuos, käyttöohjeet
- Säilytys: +2-8°C



Tilaustiedot:

Tilausno.	Tuote
602070	Celiac quick test, 20 testiä


Biohit Oyj
Laippatie 1
00880 Helsinki
Puh. +358 9 773 861
info@biohit.fi

Tilaa esitteitä: info@biohit.fi

www.biohit.fi

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health

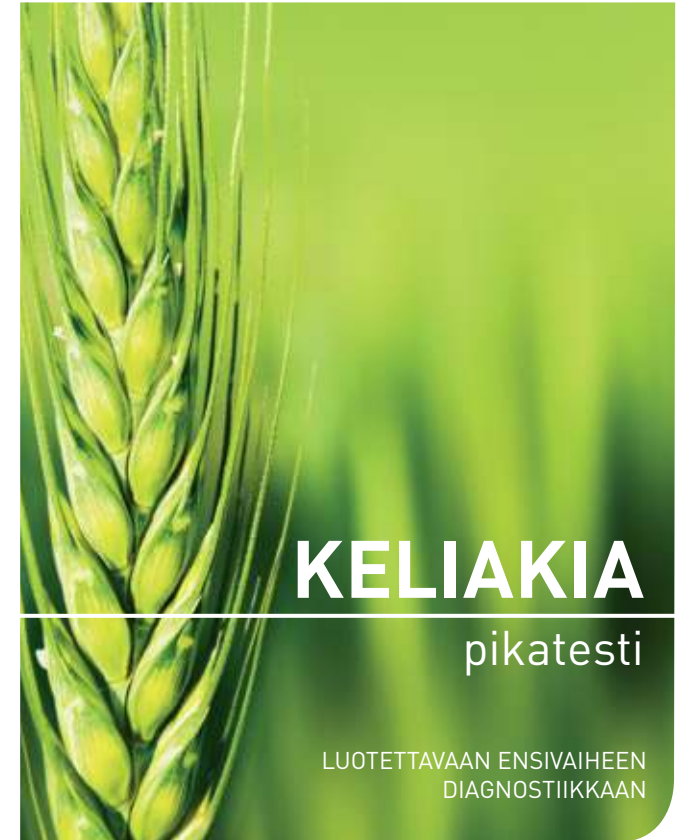

KELIAKIA
pikatesti

LUOTETTAVAAN ENSIVAIHEEN
DIAGNOSTIIKKAAN



490068FI-02 02/2020



KELIAKIA pikatesti

Luotettava tulos sormenpää- verinäytteestä

Keliakiapikatestillä voidaan luotettavasti ja vaivattomasti määrittää keliakia vain pisarasta verta. Testi perustuu elimistön tuottamiin kudostransglutaminaasivasta-aineisiin; IgA, IgG ja IgM. Tästä johtuen testillä on erinomainen herkkyys, erityisesti niiden potilaiden kohdalla, jotka kärsivät IgA-puutoksesta.

- Tulos 10 minuutissa
- Tehdään sormenpääverinäytteestä
- Helppokäyttöinen immunokromatografinen testi
- Herkkyys yli 99 %, tarkkuus 98,9 %

Helppo vieritetaus


Verinäyte keliakiapikatestiä varten otetaan helposti sormenpäältä. Näyte asetetaan testitika-setille ja päälle tiputetaan puskuriliuosta. Testitulokset on luettavissa 10 minuutissa.

Helppo näytteenotto - nopeat tulokset

1. Ota sormenpääverinäyte.



2. Tyhjennä verinäyte (20 ul) näytteenkeräimestä näytekaivoon ja tiputa päälle kaksi tippaa puskuriliuosta.

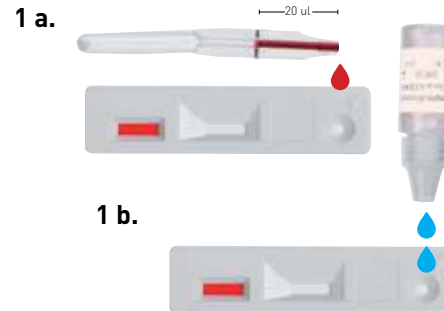

3. Lue tulos 10 minuutin kuluttua.

Negative



Positive



Tulos 10 minuutissa

